



POLICY NUMBER: APP.E.SMW.F.2

APPROVAL DATE:  
June 9, 2008

LAST REVISED:  
June 9, 2008

**How to use  
the EpiPen®  
Auto-  
Injector...  
Three  
simple steps:**



**Comment utiliser  
l'auto-injecteur  
d'adrénaline  
EpiPen®  
en trois étapes  
simples.**



1. Pull off grey safety cap.
1. Enlever le couvercle gris de sécurité.



2. Jab black tip into outer thigh until unit activates.
2. D'un coup sec, placer le bout noir sur la cuisse jusqu'au déclenchement du mécanisme d'auto-injection.



3. Hold EpiPen® in place several seconds. Then discard unit.
3. Laisser en place pour plusieurs secondes. L'unité EpiPen® doit ensuite être enlevée et jetée.